

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Spedali Civili</p> <hr/>  <p>UNIVERSITA' DI BRESCIA</p>	<p>Procedura Operativa interna Sanificazione diagnostiche Medicina Nucleare <i>Emergenza Covid-19</i></p>	<p>Data rev: 13/03/2020</p>
---	---	---

1. SCOPO E GENERALITA'

Scopo del presente documento è fornire indicazioni per la sanificazione delle diagnostiche dell'U.O. Medicina Nucleare nelle attività di routine per ridurre al minimo la possibilità di diffusione del COVID-19.

2. APPLICABILITA' E RESPONSABILITA'

Le indicazioni si applicano in tutte le diagnostiche dell'U.O. Medicina Nucleare e la responsabilità della corretta applicazione è di tutti i TSRM appartenenti alla stessa.

N.B. si raccomanda di indossare la mascherina durante l'intero turno lavorativo

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Accesso alla diagnostica:

All'inizio dell'esame il TSRM, provvisto degli idonei DPI come da procedure aziendali, chiama il paziente (munito a sua volta di mascherina portata da casa o consegnata in ingresso) e lo indirizza nella diagnostica.

La porta automatica a scorrimento, di cui sono provviste alcune diagnostiche, deve essere considerata la miglior soluzione di passaggio, poiché può essere aperta senza l'uso delle mani con pressione attraverso il gomito sul pulsante di apertura. Per le diagnostiche PET/TC la maniglia di della porta schermata deve essere utilizzata dal solo TSRM (evitando il suo uso da parte di pazienti, infermieri od altro personale) che indossa guanti puliti. Una volta entrati nella diagnostica il paziente

può usufruire dello spogliatoio passando dalla porta interna che può rimanere aperta, ad eccezione delle acquisizioni TC (in relazione del sensore di sicurezza durante le acquisizioni TC).

Si raccomanda di lasciare aperte tutte le porte che non hanno scopo di filtro depressionale tra interno ed esterno del reparto.

Allestimento lettino diagnostico:

- Il materassino originale deve essere ricoperto SOLO dal telo di carta monouso (senza uso di lenzuolino in stoffa sottostante)
- I cuscini, avvolti nella federa devono essere ricoperti da sacchetti di plastica da sanificare ad ogni esame. Su di essi va sempre posizionato il telino monouso in carta

Sanificazione:

I gantry, le superfici esposte delle apparecchiature, i moduli di comando e le postazioni di visualizzazione delle immagini all' interno della sala diagnostica devono essere disinfettati **dopo ogni procedura**.

Al termine dell'acquisizione il TSRM invia in sala d'attesa ed in seguito:

- elimina il telino di carta usato riponendolo nell'apposito "alipack"
- disinfetta i guanti monouso e li sostituisce con un paio pulito
- procede alla disinfezione di lettino, apparecchiature(come sopra), eventuali cavi dell'elettrocardiografo spruzzando i disinfettanti contenenti alcol al 75% o a base di cloro 1% (Amuchina o Spraycid), presenti in diagnostica, su alcuni fogli di carta del rotolo impiegato normalmente per coprire il lettino o delle garze monouso.

N.B. si raccomanda di non spruzzare i disinfettanti direttamente sulle apparecchiature elettroniche

- procede, poi, con le stesse modalità, alla sanificazione di cinture di contenzione, caschetti testa-collo, prolunghe del lettino cuscino o di **QUALUNQUE SUPERFICIE** sia stata a contatto con il paziente (anche sedia dello spogliatoio e maniglie porte) Questa procedura vale anche per la sedia e l'appendiabiti situati nella sala diagnostica PET.
- allo stesso modo procede alla disinfezione del mouse e delle tastiere utilizzate

- terminata la disinfezione toglie i guanti e utilizza il disinfettante per le mani a base alcolica presente in diagnostica
- indossa un paio di guanti puliti e ripristina la diagnostica per il paziente successivo: telino di carta monouso, impostazione dell'esame alla consolle di acquisizione, etc.

Se in una stessa diagnostica lavorano 2 TSRM i compiti dovrebbero essere ripartiti nel seguente modo con alternanza a giorni alterni, in modo da omogeneizzare la dose efficace a ciascun operatore:

- 1 TSRM si occupa della acquisizione dell'esame, all'interno della sala diagnostica, e provvede alla sanificazione della stessa
- 1 TSRM si occupa della consolle di impostazione, elaborazione, RIS-PACS, gestione **TELEFONO** nella sala comandi e provvede alla sanificazione degli strumenti utilizzati

4. DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è distribuito in formato cartaceo a tutti i TSRM dell'U.O. Medicina Nucleare ed è custodito nel manuale delle procedure operative presente in ogni diagnostica e in formato elettronico, consultabile sul disco di rete Medicina Nucleare (J) – Programmi mensili – POS COVID-19 sanificazione